



目录

- 安全注意事项..... 2
- 关于废弃&规格..... 6
- 感觉异常时..... 7
- 使用结束后..... 9
- 收纳及保管..... 10
- 常见问题..... 11
- 各部名称..... 13
- 使用前准备..... 15
- 使用方法..... 18

- 感谢您购买本公司产品。
- 使用之前请您务必仔细阅读本使用说明书。
- 请您务必妥善保管本使用说明书。

版号: No.1
W9030 NA33101
出版日期: 2014年03月

安全注意事项

下文列举的是使用中为防止人身、财产损害而必须严格遵守的安全事项。
■所有安全事项将根据因错误使用而导致危害或损害的程度，予以说明。

- 警告** 可能造成重伤或死亡后果的事项内容。
 - 注意** 可能造成轻伤或财产损害的事项内容。
- 请注意各事项前的符号（下文为符号范例）
- 绝对禁止事项
 - 必须执行事项

警告

- 正在接受治疗或有以下症状的人，在使用本机前，应咨询医师。
 - (1)佩戴起搏器或其它易受电子干扰的体内植入型电子医疗器械的人
 - (2)恶性肿瘤病人
 - (3)腿部有血液循环障碍的人
 - (4)心脏病病人
 - (5)被查证丧失辨别温度能力的人
 - (6)孕妇或刚完成分娩的人
 - (7)因糖尿病等高度末梢循环障碍引起知觉障碍的人
 - (8)骨质疏松症患者、脊椎骨折病人、患有扭伤或肌肉拉伤等急性疼痛性疾病的人
 - (9)按摩部位受伤的人
 - (10)体温38℃以上(有发热症状)的人(例:急性炎症症状[如倦怠感、寒颤、血压变动等]强烈时、身体虚弱时)
 - (11)必须静养或身体显著不适的人
 - (12)除上述之外，身体感觉特别不适的人
- 使用中感到身体异常、或使用后觉得没有效果时，请立即停止使用，并咨询医师。
否则可能导致事故、身体状况不佳。

警告

- 使用前，请务必确认布料有无破损。
- 小的破损、也要停止使用，拔下电源适配器，委托修理。
否则有受伤、触电、低温烫伤*的可能。
*较低温度(40℃~60℃)，长时间触及皮肤同一部位即使没有热、痛等感觉，也可能引发低温烫伤。
- 请务必使用交流电220V。
- 产品不动作或感觉异常时请停止使用，立即拔下电源适配器委托检查修理。
- 确认电源适配器插头确实插入插座。
否则有起火和触电的可能。
- 使用加热片时，请勿长时间接触。
否则有低温烫伤的可能。
*以下的人群使用后有可能出现皮肤发红的现象，1小时之后，红色仍不消退者，请向医生咨询。
上年纪的人、皮肤脆弱者、皮肤感觉脆弱者。
- 下列人员请勿使用本机。
被医生禁止按摩的人(例:患有血栓症、重度动脉瘤、急性静脉瘤、各种皮炎或皮肤感染症[包括患皮下组织炎症]的人等)否则可能导致症状恶化。
- 绑带不可上下颠倒使用。
否则可能造成事故或身体不适。
- 使用中请勿站立或行走。
- 不可用于单侧按摩，只能双侧小腿或脚同时按摩。
- 不可用于小腿和脚部按摩以外的用途。
- 不可让婴幼儿和孩子以及自己不能操作者使用。
不可坐在绑带或主机上玩耍。
可能造成事故和受伤。

警告

- 请勿对电源适配器的导线和气管，进行划伤、加工、过度弯曲、拉拽、扭曲。
请勿在上面放重物或塞入狭缝。
可能导致起火和触电。
- 以下情形不可使用
 - 电源适配器或气管插头损坏。
 - 电源适配器的插头松动。
 - 气管插头插入主机时松动。
 可能导致短路引发火灾或触电、起火及故障。
- 请勿通过变压器使用
可能会导致事故或触电
- 本产品不能在被褥或被炉中使用
可能导致故障或触电
- 不能用湿手从插座上插拔电源适配器。
- 不能用湿手从按摩器上插拔气管插头。
有可能触电
- 禁止改造、自行分解或修理。
可能导致起火或触电
请委托Panasonic认定服务店检查、修理。

注意

- 使用中如果身体感觉异常，请立即停止使用并向医生咨询。
否则可能会导致事故或身体不适。
- 同一部位1次按摩请控制在10分钟以内
否则可能导致负面的效果或伤害事故。
- 拔出电源适配器时，请勿拉扯导线，必须手持适配器主体拔出。
- 拔掉气管插头时请勿拉扯气管，必须手持插头拔出。
- 请使用指定型号的电源适配器(EW-3A04)
否则可能导致短路而引发火灾或触电、起火。
- 请勿强拉连接软管。
否则会造成软管内导线断线或故障。
- 不要使大头针、垃圾、水等进入电源适配器和主机的缝隙中。
- 按摩中不要拔出电源适配器或者拔下气管。
否则可能导致短路而引发触电、起火。
- 收纳时请勿将电源线缠绕在主机上或将气管缠绕在绑带上。
可能因导线和连接管超负荷而断线，导致短路引发火灾、触电、故障。
- 请勿与其它理疗器同时使用。
- 请勿使用时睡觉。请勿酒后使用。
可能导致事故或身体不适。
- 请勿在浴室等湿度高的地方使用。
- 请勿使主机或绑带沾水。
可能导致故障或触电。
- 收起的时候，务必将电源适配器拔掉。
否则可能导致触电或受伤。
- 不使用时，将电源适配器拔掉。
否则因绝缘老化可能导致触电、漏电、火灾。

感觉异常时

症状	原因及处置
●强、中、弱指示灯不亮 ●不动	●电源适配器脱落了。(参照P15) ●主机的电源[开关/强度选择]键被关掉。(参照P20)
按摩中途停止	●电源适配器脱落了。(参照P15) ●按摩约10分钟会自动停止。 ●气管是否插到根部?(参照P18)
按摩弱	●绑带是否固定好?(参照P16) ●气管上是否压有物品? ●气管是否折叠?
●温热LED灯不开 ●感觉不到温度	●不进行按摩时，温热不可单独使用。(参照P20) ●温热开关设定为[关]。(参照P21) ●气管插头是否插到根部?(参照P19)
●左右温热不一样 ●温度弱	●绑带是否固定好?(参照P16) ●影响温度感觉的因素:与加热片的接触情况、按摩动作、室温、衣服等。
空气排不干净	●绑带的粘扣松开。
破损	敬请协作 请勿自行修理，并请务必委托Panasonic认定服务店检查、修理。
主机和电源适配器异常热	

使用结束后

- 请勿必切断电源
- 卸下绑带
 - 从插座上拔出电源适配器
 - 从主机上拔下电源适配器插头及气管插头
 - 用绑扎带束好电源线。
*不要绑在主机上。
 - 折好绑带
 - ①搭好搭扣
 - ②2个绑带叠放
 - ③轻折气管放置在绑带上
*或卷在绑带中
 - 收入盒内
 - 请使用收纳盒收纳
 - *气管勿折
- 请勿将电源线绑在主机，应另行绑扎保存。
线芯断线则有触电危险

收纳及保管

- 收纳
- 请勿必切断电源
- 主机、绑带及气管脏污时，请用布蘸肥皂液擦拭。
- 请勿使用稀料、汽油或酒精，以免引起故障，部品破损或变色等。
 - 勿使异物进入气管插入口。
 - 搭扣上粘附垃圾、毛发等时，可用牙签等摘除。
- 保管
- 请勿放置在孩子的手能碰到的地方
- 请勿分解主机。请勿从高处摔落机体或对机体过分施力。
 - 请勿放置在温度、湿度较高或阳光直射的地方。
 - 避免针、棒等戳刺或利物碰触主机及绑带。
 - 不要在主机及绑带上放置其它物品或可导致表面留下痕迹掉色或变色的物品。
 - 使用前检查电源线有无断线、破损、划伤等，避免下次使用时产生故障。保存于洁净处。

常见问题

- 什么情况下不可以使用?
- 发烧时，特别是原因不明时有可能是其它重大疾病
 - 妊娠中或产后荷尔蒙的平衡破坏时。
 - 脚部伤残严重的人员使用时会给血管带来极大的负担。以上情况请务必遵医嘱使用。
- 一天可使用多长时间?
- 按摩同一位置时间为10分钟以内。长时间使用会使肌肉神经受到不必要的刺激，产生负面效果。
- 每次按摩的强度一样吗?
- 根据绑带的卷绑方法，每次感受到的强度会有差异。
- 为什么会有下列声音出现?
- 此为构造现象，不是异常。
- 气囊动作的声音(哗啦哗啦声)
 - 电磁阀切换的声音(咔嚓声)
 - 马达音(嗡嗡声)
- 使用中主机温度会上升吗?
- 由于结构原因会有一些升高，不是异常。

关于废弃

处理方式请遵守当地规定。

规格

商品名称	腿部按摩器	EW-NA33
使用电源	220V~ 50Hz	
功率	17W(加热片的功率5W)	
空气压力	腿肚使用时	弱:约30kPa 中:约40kPa 强:约47kPa
	脚使用时	弱:约22kPa 中:约35kPa 强:约41kPa
时间	约10分钟	
尺寸(包装数)	主机(1个)	长70mm×宽54mm×高200mm
	绑带(2个)	长570mm×宽15mm×高360mm
重量	约810g(主机+右绑带+左绑带)	
电源线长度	约1.8m	
绑带对应周长	腿肚周长 约27cm~48cm	
绑带加热温度	约40℃(室温20℃时)	
执行标准	GB4706.1 GB4706.10	

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理)，从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
b.本保修证仅限于中华人民共和国境内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
b.因不正确操作、电源不正常、碰撞(如：摔落等)而造成损坏的；
c.不经Panasonic认定服务店维修人员拆卸造成损坏的；
d.不能出示本保修证及有效购机发票的；
e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
f.因不可抗力因素(如雷击、地震、火灾、水灾等)而造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性使用。
5.产品制造商在需要时，可以向Panasonic认定的合格技术人员提供产品电路图和可修理的元器件资料。

【商品信息】
商品名称:.....产地:..中国..北京.....
商品型号:.....制造编号:.....

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号:	制造编号:	保修结束4
商品型号:	制造编号:	保修结束3
商品型号:	制造编号:	保修结束2
商品型号:	制造编号:	保修结束1
商品型号:	制造编号:	经销商留存